



Per il rilevamento del gene della tossina B (tcdB) del Clostridium difficile (C. difficile) tossigeno in campioni di feci non formate (liquide o molli).
Per l'uso con lo strumento Revogene.
Per eseguire correttamente l'analisi dei controlli esterni e l'interpretazione dei risultati, fare riferimento alle istruzioni complete attuali.

PROCEDURA DEL TEST

Come eseguire l'analisi


C. difficile

1.

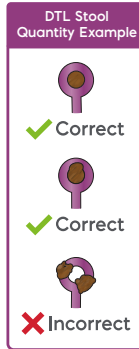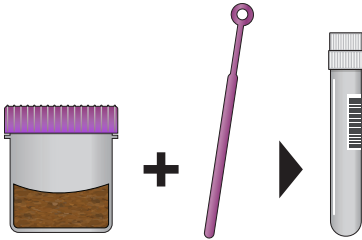


- Agitare su vortex il campione di feci ad alta velocità per 15 secondi.
- Utilizzando il Disposable Transfer Loop (DTL) fornito, trasferire circa 5 µL di campione nella Sample Buffer Tube (SBT) fornita. Rimuovere eventuali feci molli in eccesso presenti al di fuori del loop.
- Agitare su vortex la SBT ad alta velocità per 15 secondi.
- Aprire la busta contenente la PIE di Revogene® C. difficile.

2.

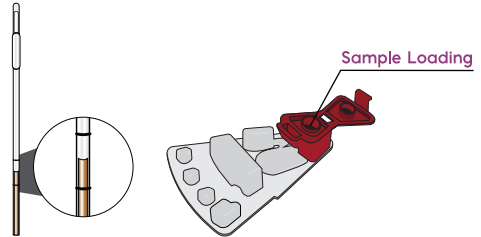

- Utilizzando il Disposable Transfer Tool (DTT), aspirare il Sample Buffer (SB) comprimendo l'intero bulbo finché il livello del liquido non si trova tra le due linee sul DT.
- Scaricare completamente il campione nella camera di caricamento del campione della PIE.
- Chiudere bene il tappo della camera di caricamento del campione.

3.

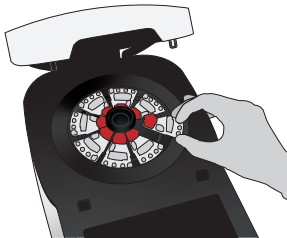

- Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare la PIE del test del paziente.
- Caricare i restanti test del paziente. Se vengono analizzate meno di otto (8) PIE, caricare delle MOCK PIE nelle posizioni rimanenti del carosello.
- Eseguire la scansione dell'anello di ritenzione e posizionarlo sul carosello.

4.



- Chiudere il coperchio dello strumento con entrambe le mani e assicurarsi che il blocco coperchio sia inserito.
- Selezionare «Avvia» per avviare il test e allontanarsi.
- Una volta completata la serie, il coperchio si apre.
- Al termine della serie, rimuovere tutte le PIE e la MOCK PIE.
- Toccare l'icona «Risultati» per vedere i risultati del test.



Questa illustrazione raffigura le istruzioni per l'uso complete e aggiornate al momento della pubblicazione. Consultare le versioni complete più aggiornate delle istruzioni per l'uso del test e dello strumento. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com