


Per il rilevamento e la differenziazione delle sequenze geniche *bla_{SHV}*, *bla_{TEM}*, *bla_{NDM}*, *bla_{IMP}*, *bla_{OXA-48}* e *bla_{SP}* associate a colonie pure non sensibili ai carbapenemi di Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii, o Pseudomonas aeruginosa.

Per l'uso con lo strumento Revogene®. Per eseguire correttamente l'analisi dei controlli esterni e l'interpretazione dei risultati, fare riferimento alle istruzioni complete attuali.

PROCEDURA DEL TEST


Come eseguire l'analisi

1.

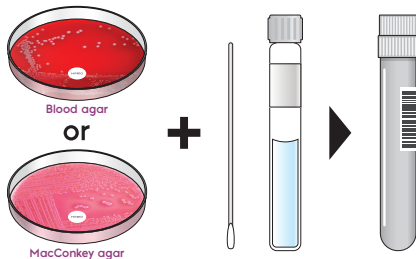

- Trasferire le colonie per ottenere una sospensione secondo lo standard McFarland 0,5.
- Agitare su vortex la sospensione McFarland 0,5 ad alta velocità per 15 secondi.
- Utilizzando una micropipetta, aspirare 15 µL di sospensione McFarland e dispensarla nella Sample Buffer Tube (SBT).
- Agitare su vortex la SBT ad alta velocità per 15 secondi.
- Aprire la busta contenente la PIE di Revogene® Carba C.

2.

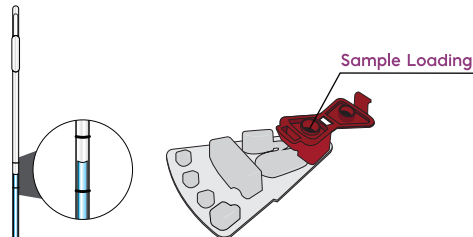

- Utilizzando il Disposable Transfer Tool (DTT), aspirare il Sample Buffer (SB) comprimendo l'intero bulbo finché il livello del liquido non si trova tra le due linee sul DTT.
- Scaricare completamente il campione nella camera di caricamento del campione della PIE.
- Chiudere bene il tappo della camera di caricamento del campione.

3.



- Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare la PIE del test del paziente.
- Caricare i restanti test del paziente. Se vengono analizzate meno di otto (8) PIE, caricare delle MOCK PIE nelle posizioni rimanenti del carousel.
- Eseguire la scansione dell'anello di ritenzione e posizionarlo sul carousel.

4.



- Chiudere il coperchio dello strumento con entrambe le mani e assicurarsi che il blocco coperchio sia inserito.
- Selezionare «Avvia» per avviare il test e allontanarsi.
- Una volta completata la serie, il coperchio si apre.
- Al termine della serie, rimuovere tutte le PIE e le MOCK PIE.
- Toccare l'icona «Risultati» per vedere i risultati del test.



Questa illustrazione raffigura le istruzioni per l'uso complete e aggiornate al momento della pubblicazione. Consultare le versioni complete più aggiornate delle istruzioni per l'uso del test e dello strumento. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com