

PROCÉDURE DE TEST

Comment procéder



1. Prélèvement des échantillons:


Le prélèvement des échantillons de la gorge doit être réalisé conformément aux directives publiées concernant le prélèvement d'échantillons cliniques pour la culture du *streptocoque* du groupe A.



2. Séparer les écouvillons doubles et retirer un écouvillon pour procéder au test Alethia™.




3. Insérer l'écouvillon dans le tube de préparation des échantillons II, remettre le bouchon et mélanger au vortex pendant 10 secondes.

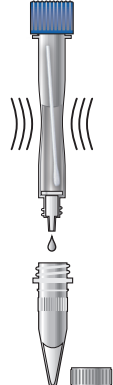


4. Retirer le capuchon de l'embout et dispenser 5 à 10 gouttes d'échantillon dans le tube de traitement thermique.



5. Chauffer le tube de traitement thermique à 95 C pendant 10 minutes. Mélanger au vortex pendant 10 secondes.

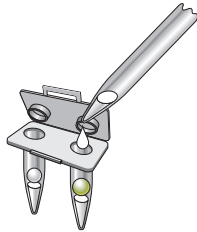

6. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL de l'échantillon traité thermiquement dans la chambre de TEST (gauche), puis 50 µL dans la chambre de CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.

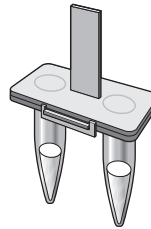

7. Fermer et fixer le loquet de sécurité. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air piégées au fond des tubes. Examiner soigneusement les tubes de réaction pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air.



8. Insérez le dispositif de test Alethia™ dans l'instrument Alethia™ et lancez la réaction d'amplification et la détection.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™