



alethia™

Malaria


PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA Cómo realizar la prueba

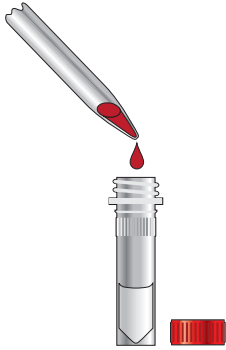


1. Mezcle el tubo de extracción de sangre dándole la vuelta 2-3 veces. Añada 50 µL de muestra al tubo de tampón I Alethia™. Dele la vuelta 5 veces para que se mezcle y deje que repose durante 2 minutos.

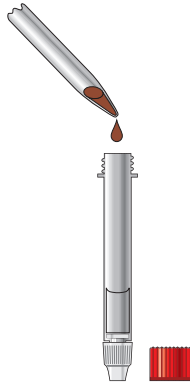


2. Dele la vuelta a la muestra preparada 5 veces para que se mezcle y transfiera inmediatamente 50 µL al SMP PREP IV. Dele la vuelta al SMP PREP IV 5 veces para que se mezcle.

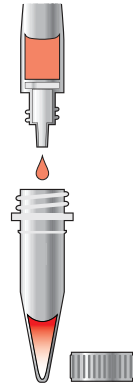

3. Quite la tapa de la punta del SMP PREP IV y apriete con suavidad para recoger 5-10 gotas con un tubo I limpio.

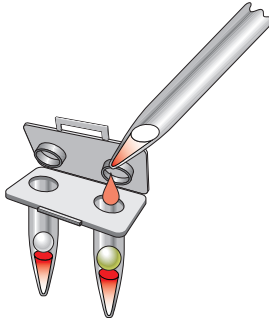

4. Utilizando una micropipeta, transfiera 50 µL de la muestra tanto a la cámara de PRUEBA (ado izquierdo) como a la cámara de CONTROL (ado derecho) del dispositivo de prueba Alethia™ Malaria.

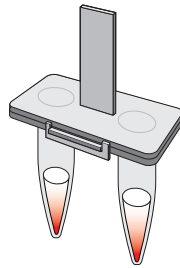

5. Cierre y asegure bien el cierre. Golpee suavemente el dispositivo para eliminar las burbujas de aire atrapadas en la parte inferior de los tubos. Examine cuidadosamente los tubos de reacción para asegurarse de que no hayan quedado burbujas de aire en el tubo.



6. Introduzca los dispositivos de prueba Alethia™ en el instrumento Alethia™ e inicie la reacción de amplificación y detección seleccionando el programa Malaria.



Esta ilustración es representativa del prospecto actual en el momento de su publicación. Para disponer de instrucciones completas, consulte la versión más actualizada del prospecto.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™