



PROCEDURE DE TEST


Comment effectuer le test

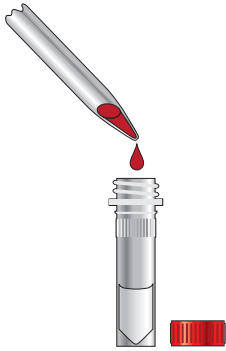


1. Mélanger le contenu du tube de prélèvement sanguin par inversions 2 à 3 fois. Ajouter 50 µL de l'échantillon dans le tube de tampon I Alethia™. Mélanger en inversant 5 fois et laisser reposer pendant 2 minutes.

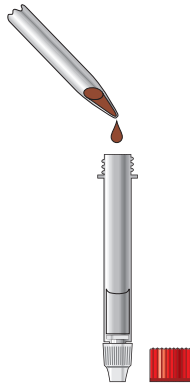


2. Mélanger l'échantillon préparé en inversant 5 fois et transférer immédiatement 50 µL vers le système SMP PREP IV. Mélanger le système SMP PREP IV en inversant 5 fois.

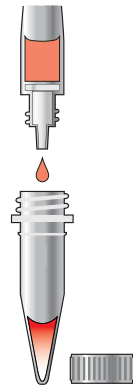

3. Retirer le bouchon de l'embout du système SMP PREP IV et presser doucement ce dernier pour en recueillir 5 à 10 gouttes dans un tube I propre.

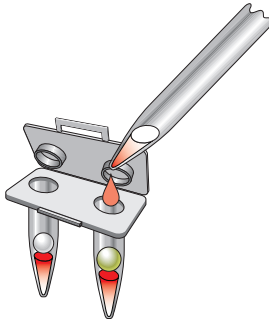

4. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL de l'échantillon à la fois vers le puits TEST (gauche) et le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™ Malaria.

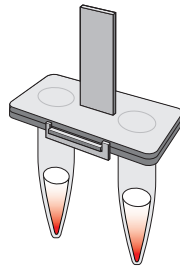

5. Fermer et fixer le loquet de sécurité. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air piégées au fond des tubes. Examiner soigneusement les tubes de réaction pour s'assurer qu'il n'y reste pas de bulles d'air.



6. Insérer les dispositifs de test Alethia™ dans l'instrument Alethia™ et lancer la réaction d'amplification et la détection en sélectionnant le programme Malaria.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 63 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™