


PROCÉDURE DE TEST

Comment procéder



- 1. Ecouvillon sec:** Insérer la tête de l'écouvillon dans le tampon I et la faire tourner environ 5 fois pour éluër la salive. Presser l'écouvillon contre la paroi du tube pour en essorer le liquide. Jeter l'écouvillon.

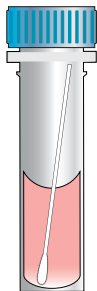


- 1. Milieu de transport viral:** Pipetter 100 µL de milieu de transport dans le tampon I et reboucher. Passer le tube au vortex pendant environ 10 secondes pour mélanger.




- 2.** Incuber entre 19 et 30 C pendant 2 à 3 minutes.



- 3.** Pipetter 50 µL de la solution tampon I dans le tube de tampon II. Reboucher le tampon II. Passer au vortex pour mélanger.

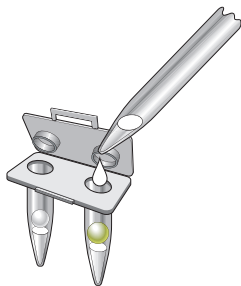

- 4.** Transférer 50 µL du tube de tampon II dans chaque chambre du dispositif de test Alethia™.

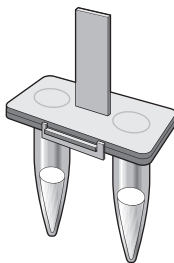

- 5.** Fermer et rabattre le loquet de sécurité. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air formées au fond des tubes. Examiner soigneusement les puits de réaction pour s'assurer qu'il n'y reste plus de bulles d'air.



- 6.** Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'instrument Alethia™ et lancer le test du CMV.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0) 6789 5959
France Tel: +33 (0) 1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0) 411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0) 20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com