


- Indique al paciente que **aguarde la respiración durante 4-5 segundos** y luego exhale en la bolsa de muestra de aliento de REFERENCIA azul.

- Presione la tapa hasta que se encaje


- Prepare la bebida de prueba **disolviendo el polvo cítrico y la tableta de urea 13C enriquecida** en 150 a 200 ml de agua del grifo en la taza provista

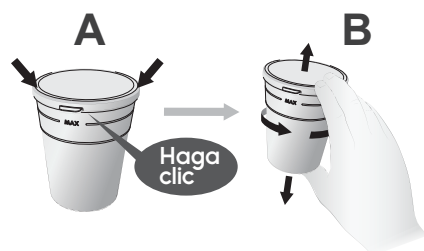

- Cierra la copa **firmermente** con ambas manos
 - Mezclar hasta que se **disuelva** por completo

- Abra la tapa e indique al paciente que **beba** toda la solución con el popote **en 2 minutos**

- Espere **15 minutos**

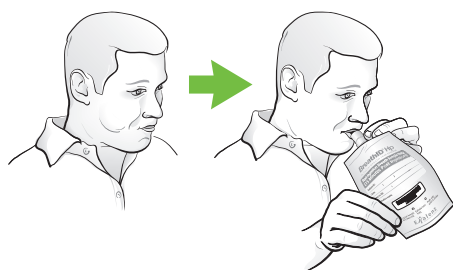

- Indique al paciente que **aguarde la respiración durante 4-5 segundos**, y luego **exhale** en la bolsa de muestra de aliento POS-INGESTIÓN gris

- Presione la tapa hasta que se encaje

- Coloque **ambas** bolsas con muestras de aliento en la bolsa de transporte suministrada

Para obtener información detallada relativa al procedimiento paso a paso, consulte el inserto del IDkit Hp® Two

breathID®



Escanear para ver el video

meridian BIOSCIENCE®